


Extrait de la notice MY LIFE YPSOMED® YPSOPUMP

Réglage de l'heure

L'écran permettant de régler l'heure apparaît.

Réglez l'heure actuelle (heures, minutes) en sélectionnant la valeur souhaitée.

Confirmez les valeurs réglées en touchant.

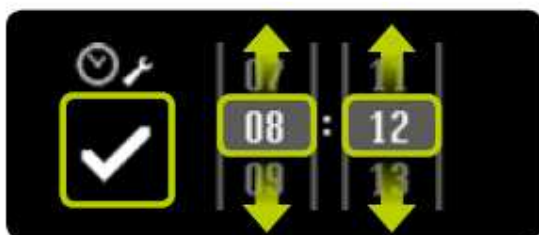

Vous pouvez ajuster l'heure et la date à tout moment dans le menu Paramètres.

Vous pouvez consulter dans l'historique de traitement vos changements d'heures :



Heure modifiée

Avertissements

Soyez particulièrement vigilant lorsque vous réglez l'heure. Un mauvais réglage de l'heure peut entraîner un décalage des heures du profil de débit basal. Ne modifiez vos réglages qu'après avoir consulté votre professionnel de santé.

Une programmation incorrecte de la pompe peut entraîner des dosages erronés d'insuline, susceptibles de provoquer des hypoglycémies ou des hyperglycémies.