

Extrait de la Notice ANIMAS VIBE

Configuration

Régler/modifier la date et l'heure

Lorsque vous changez la pile, vous pouvez modifier la date et l'heure sur l'écran VÉRIFIER.

Vous pouvez également accéder à l'écran de RÉGLAGE de date et d'heure en sélectionnant Réglages dans le MENU GÉNÉRAL.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **OK** pour sélectionner « Menu ». Allez sur « Réglages » dans le MENU GÉNÉRAL. Appuyez sur **OK**.

2. Allez sur Heure/Date dans le menu RÉGLAGES. Appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur la touche **OK** pour activer le mode Modifier (le curseur clignote).

14 : 27 ■ ■ ■ ■	
Débit de base 0,025U/h	
Insuline : 105U	
Statut	Menu

MENU GÉNÉRAL	
Bolus	
CGM	
Arrêt/Réact.	
Historique	
Basal	
Réglages	
Purge/Retour	
Statut	Acc.

RÉGLAGES	
Heure/Date	
Sons	
Options	
<<←	Acc.

4. Utilisez les touches **▲/▼** pour modifier les paramètres à votre gré. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et quitter le mode Modifier.

5. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner le champ suivant. Recommencez la procédure ci-dessus. Faites défiler pour sélectionner « Retour » et appuyez sur la touche **OK** lorsque vous avez terminé. L'écran MENU GÉNÉRAL s'affiche.

REMARQUE :

- Il est important que la date et l'heure soient correctement réglées sur votre pompe. Vérifiez que ces données sont bien correctes avant de les enregistrer dans votre pompe.
- Si vous sélectionnez le format 12 heures, les indicateurs AM/PM changent à mesure que vous faites défiler les heures. Vérifiez que l'option AM ou PM s'affiche correctement lorsque vous réglez l'heure.
- Si vous sélectionnez le format 24 heures, l'heure s'affiche normalement.

RÉGLER	
Heure/Date	
Heure : Minute	
14: 27	
Format	24 h
Mois	Jan
Jour	29
Année	2010
<<←	Acc.

Heure d'été/heure d'hiver (selon les régions et les pays)

« Heure d'été »

Si vous avancez l'heure de votre pompe après 23 h mais avant minuit, vous devez également modifier manuellement la date et ajouter un jour. Si vous modifiez l'heure de votre pompe après minuit, la date de la pompe est correcte puisque c'est toujours la même.

« Heure d'hiver »

Nous vous recommandons de reculer l'heure de votre pompe avant minuit le samedi ou après 1 h le dimanche. Ainsi, la date demeure la même et votre pompe est correctement réglée. Votre pompe enregistre alors une heure supplémentaire dans l'historique de la dose quotidienne totale puisque le passage à l'heure d'hiver a rajouté une heure à cette journée. Si vous modifiez l'heure entre minuit et une heure du matin, vous devez également ajuster la date. Cela générera donc une double entrée dans l'historique (L'entrée en double contiendra la quantité d'insuline administrée sur une heure au maximum).