

## Extrait de la notice CellNovo

### ► Date et heure

Vous avez choisi la date et l'heure lors de votre première utilisation, mais vous pouvez les modifier comme suit:


ÉTAPE 1



2.



3.

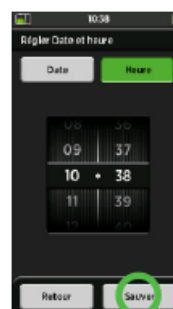

► Appuyez sur **Date et Heure**

► Utiliser les molettes de défilement pour sélectionner une date. Appuyez sur **Heure**

► Utiliser les molettes de défilement pour sélectionner une heure. Appuyez sur **Sauvegarder**

4.



► **Maintenir appuyé pour confirmer les paramètres**

**AVERTISSEMENT:** Changer l'heure peut affecter l'administration d'insuline basale. Une mauvaise délivrance du débit basal peut entraîner des complications.

La date et l'heure ne se mettent pas à jour automatiquement selon les fuseaux horaires ou lors du passage été/hiver de l'heure.



Vous ne pouvez pas changer la date et l'heure pendant le fonctionnement de votre pompe. Arrêtez d'abord la pompe et changez ensuite la date et/ou l'heure. Vous devez redémarrer votre pompe en démarrant un profil basal. Le profil affichera alors les nouvelles date et heure.